

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

مدل دستگاه:

شماره سریال:

دوره	شرح	کاملا سالم	مشکلات جزئی	خراب
روزانه	کابل و دو شاخه برق ورودی را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	اتصال برق ورودی به دستگاه UPS یا استابلایزر استاندارد کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	دستگاه را از نظر صدا، دما و بوی نامناسب کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	دستگاه را از نظر نشتی مایع بررسی نمایید.	☐	☐	☐
	مسیر آب ورودی و خروجی دستگاه را از نظر گرفتگی و نشتی کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	عملکرد پمپ خون را پس از اتصال ست دیالیز کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	دستگاه Self Test را پاس می کند.	☐	☐	☐
	بدنه دستگاه را از نظر نظافت کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	سطوح خارجی و صفحه نمایش دستگاه را از نظر نظافت (با مواد مورد تایید کمپانی سازنده) بررسی نمایید.	☐	☐	☐
	ظرف های اسید و بلیچ را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	محل قرارگیری ظرف های اسید، بلیچ و محلول دیالیز خشک می باشد.	☐	☐	☐
	نحوه انجام شستشوی دستگاه را طبق دستورالعمل کمپانی سازنده کنترل نمایید.	☐	☐	☐

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملاً سالم	مشکلات جزئی	خراب
هفتگی	درب پمپ خون را از نظر شکستگی کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	محدوده آلارم کانداکت را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	محدوده آلارم فشار وریدی را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	محدوده آلارم فشار شریانی را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	محدوده آلارم دمای محلول دیالیز را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	بدنه دستگاه از نظر شکستگی و ترک خوردگی کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	محل قرارگیری پودر بیکربنات را از نظر شکستگی و نشتی کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	پورت محلول اسیدی و کوپلر ها را از نظر عملکرد کنترل نمایید.	☐	☐	☐

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملاً سالم	مشکلات جزئی	خراب
ماهانه (توسط شرکت تدا)	فلو آب ورودی را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	فیلتر آب ورودی را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	پمپ خون را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐
	پمپ سرنگ را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	عملکرد سنسور تشخیص هوا را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	عملکرد کلیه شیرهای برقی را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	کانداکت بیکربنات را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐
	کانداکت محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐
	سنسور تشخیص نشستی خون را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	عملکرد هواگیری محلول دیالیز را کنترل نمایید.	☐	☐	☐
	عملکرد و کارایی باتری کنترل گردد.	☐	☐	☐
	دمای محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐
	سنسور فشار وریدی را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐
	سنسور فشار شریانی را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐
	سنسور فشار محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐
	پمپ اولترافیلتراسیون را کنترل و کالیبره نمایید.	☐	☐	☐

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملاً سالم	مشکلات جزئی	خراب
۶ ماهه (توسط شرکت تدا)	اتصال ارت دستگاه کنترل گردد.	☐	☐	☐
	مقاومت چاه ارت اندازه گیری گردد.	☐	☐	☐
	زنگ زدایی لاین های دستگاه در صورت لزوم انجام گردد.	☐	☐	☐
	عملکرد صفحه نمایش کنترل گردد.	☐	☐	☐
	گرد و غبار قطعات داخلی بوسیله دستگاه مکنده/ دمنده زدوده گردد.	☐	☐	☐
	تست ناشی جریان انجام گردد.	☐	☐	☐

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملا سالم	مشکلات جزئی	خراب
سالانه (توسط شرکت تدا)	کلیه کابل ها و اتصالات کنترل گردد.	☐	☐	☐
	عملکرد دستگاه با توجه به حافظه دستگاه کنترل گردد.	☐	☐	☐
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ خون تعویض گردد.	☐	☐	☐
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ سرنگ تعویض گردد.	☐	☐	☐
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز مکش محلول تعویض گردد.	☐	☐	☐
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ اولترافیلتراسیون تعویض گردد.	☐	☐	☐
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ خون تعویض گردد.	☐	☐	☐
	با توجه به دستورالعمل کمپانی سایر قطعات مورد نیاز تعویض گردد.	☐	☐	☐