

قبل از مصرف، دستورالعمل را مطالعه نموده و به آن توجه نمایید.

موارد احتیاط

- ۱- قبل از استفاده از محصول دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.
- ۲- کارتریج یکبار مصرف بوده و از مصرف مجدد آن خودداری کنید.
- ۳- استفاده از محصول روی ماشین دیالیز صرفاً توسط افراد آموزش دیده انجام شود.
- ۴- از کارتریج تاریخ گذشته استفاده نکنید.
- ۵- از کارتریج با بسته بندی آسیب دیده استفاده نکنید.
- ۶- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- ۷- قبل از استفاده، کارتریج را از لحاظ ظاهری بررسی کنید.
- ۸- محلول دیالیز ساخته شده توسط دستگاه بلافاصله باید مصرف گردد.
- ۹- محلول حاصل از پودر بی کربنات سدیم فقط برای یک جلسه دیالیز قابل استفاده است و به شدت مستعد آلودگی میکروبی می باشد. لذا باقی مانده محلول استفاده نشده باید دور ریخته شود.
- ۱۰- فقط در دستگاه هایی که استفاده از پودر بی کربنات مجاز است استفاده شود.
- ۱۱- در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- ۱۲- این شرکت در قبال پیامدهای ناشی از حمل و نقل، نگهداری و استفاده نامناسب مسئولیتی ندارد.
- ۱۳- کارتریج پس از استفاده به روش ایمن مانند زباله های بیمارستانی و براساس مقررات بهداشتی معدوم گردد.

علائم اختصاری:

	هشدارها و احتیاط ها		سازنده قانونی
	یکبار مصرف		تاریخ ساخت
	چنانچه بسته بندی آسیب دیده از مصرف خودداری کنید		لات نامبر
	دور از نور خورشید نگهداری شود		تاریخ انقضا
	در جای خشک نگهداری شود		مرجع / شماره کاتالوگ
	فاقد phthalate (فتالات)		دستگاه پزشکی
	عدم وجود لاتکس طبیعی		قبل از استفاده به دستورالعمل مراجعه شود
	نگهداری در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد		غیر استریل

قبل از مصرف، دستورالعمل را مطالعه نموده و به آن توجه نمایید.

دامنه کاربرد

پودر بی کربنات سدیم مناسب دستگاه‌های همودیالیز JMS و IDEMSA می‌باشد که برای تهیه‌ی محلول همودیالیز با پایه بی کربنات مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبق دستورالعمل دستگاه دیالیز، با آب RO و محلول غلیظ اسیدی ترکیب شده و محلول همودیالیز را تشکیل می‌دهد.

توصیف

۱- پودر بی کربنات سدیم در هر 100 گرم دارای 1190mmol Na^+ ، 1190mmol HCO_3^- می‌باشد.

۲- نام عمومی، پودر بی کربنات سدیم Sodium Bicarbonate و نماد آن NaHCO_3 می‌باشد.

۳- مطابق دستورالعمل دستگاه همودیالیز با نسبت 1:35 امکان دیالیز را در یک ساعت با Flow rate 500ml/min فراهم می‌نماید.

۴- کارتریج بی کربنات حاوی $550 \pm 3\%$ ، $650 \pm 3\%$ ، $750 \pm 3\%$ گرم پودر بی کربنات سدیم خشک است.

۵- این محصول مطابق الزامات فارماکوپه اروپا و آمریکا می‌باشد.

۶- کارتریج به صورت عمودی روی دستگاه قرار دهید، به نحوی که کلمپ آبی به سمت بالا باشد. بعد از قرارگیری کارتریج بی کربنات بر روی دستگاه، آب RO وارد کارتریج شده و محلول بی کربنات سدیم اشباع ساخته می‌شود که بعد از ترکیب با محلول غلیظ اسیدی محلول همودیالیز بدست می‌آید.

موارد مصرف

پودر بی کربنات رقیق شده مطابق با دستورالعمل استفاده در دستگاه همودیالیز برای بیماران با نارسایی کلیه، مسمومیت های مزمن کلیه و عدم تعادل الکترولیت‌ها استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف

هیچگونه مورد منع مصرف برای دیالیز بی کربنات وجود ندارد.

اثرات جانبی

عوارض جانبی مانند افت فشار خون، گرفتگی عضلات، حالت تهوع و استفراغ و تشنج ممکن است در طول همودیالیز رخ دهد.